

CS

## POZORNĚ PŘEČÍST PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VÝROBKU

### Návod a Upozornění pro použití.

Tento dokument je **nezbytnou příručkou** pro správné a bezpečné použití výrobků **Ledragomma Original Pezzi® ACTIVA small a medium**, protože obsahuje veškeré informace, nezbytné pro **celkové uspokojení** uživatele a **bezpečné použití** výrobku po celou dobu životnosti výrobku a/nebo jeho částí.

### SPRÁVNÉ POUŽITÍ – OMEZENÍ A ZÁKAZY

1. Tento výrobek byl navržen a realizován pro použití v rozličných oblastech, jako je například sport, fitness, gymnastika nebo zdravotnictví a školství. Výrobek nesmí být používán k jiným účelům, než jsou ty, které doporučuje firma **Ledragomma**.
2. **Nejedná se o hračku.**
3. **Nepoužívat výrobek pro cviky s činkami nebo jakýmkoli jiným typem závaží.**

### OBSAH BALENÍ

4. Balení obsahuje jeden výrobek.

### NAFUKOVÁNÍ / VYFUKOVÁNÍ

5. Pro nafukování/vyfukování výrobku je nutné používat zaoblenou nástavce, kterými jsou vybaveny mnohé ruční pumpičky (např. Hand Pump 19 cm -140 CC nebo 32 cm.- 300 CC ). Nenařukat ústy.

### ZPŮSOB A POSTUP PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

6. Při prvním použití postupovat podle následujících pokynů:
  - 6.1) Výrobek je vybaven vnitřním ventilkem, přizpůsobeným pro nafukování/vyfukování.
  - 6.2) Před zasunutím do ventilků navlhčit špičku ruční pumpičky a pomalu a s přestávkami výrobek nafouknout.
  - 6.3) Nikdy nepřekračovat maximální povolený průměr uvedený přímo na výrobku a/nebo na obalu:
    - Original Pezzi® Activa Small Ø cm.12
    - Original Pezzi® Activa Medium Ø cm.16

### POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ NAFUKOVÁNÍ

7. Při následujících nafukováních nikdy nesmí být překročen maximální povolený průměr.

### OPATŘENÍ NEZBYTNÁ PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

8. Před každým použitím je nutné zkontrolovat povrch výrobku. V případě řezů, prasklin, odřenin či jakéhokoli jiného poškození povrchu nesmí být výrobek použit pro podporu těla. V těchto případech je ohrožena bezpečnost výrobku, protože může dojít k nečekanému prasknutí a pádu osoby, která je o výrobek opřena.
9. Před každým použitím výrobku je nutné očistit povrch vodou a jemným mýdlem. Odolnější skvrny mohou být očištěny naředěným lihem.

### 10. TEPLOTNÍ MEZE

Pozor: výrobek musí být udržován v prostředí s pokojovou teplotou (přibližně 18 - 20° C). V případě zvláště nepříznivých teplot je třeba před nafukováním vyčkat, než výrobek dosáhne pokojové teploty.

### DOPORUČENÝ POVRCH

11. Výrobek musí být používán na měkkém povrchu. Nikdy nepoužívat v blízkosti ostrých či řezavých předmětů nebo v blízkosti tepelných zdrojů; nepoužívaný výrobek nikdy neudržovat v místech vystavených přímému slunečnímu záření.

### UPOZORNĚNÍ PRO OPRAVY

12. V případě zjištění děr či prasklin se nepokoušejte o jejich opravu, protože neodborná oprava může ohrozit celistvost výrobku a způsobit vážné nebezpečí pro bezpečnost a zdraví uživatele.

### SLEDOVATELNOST

13. Na zadní straně této příručky je uveden kód složený z 6 čísel, který označuje měsíc a rok výroby zboží. Tento kód prosím uvádějte v případě reklamace, protože je nutný pro určení data a výrobní šarže použitých materiálů.

### OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14. Ledragomma S.r.l. odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob či zvířat nebo za škody na majetku či na životním prostředí, způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny pro použití a údržbu obsaženými v tomto návodu k použití a dodávaným spolu s výrobkem.

### POZNÁMKY

15. Barevné provedení se může lišit.

**Výrobce:** Ledragomma Srl - Zona Industriale C.I.P.A.F. – 33010 Osoppo (Ud) – Italy

Tel.+39 0432/986049 – Fax +39 0432/986255 - info@ledragomma.com - www.ledragomma.com

*Vyrobeno v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2008 - 13485:2003 "zdravotnické prostředky"*